

## SARS-CoV-2 C€ Antigen Rapid Test Kit

(Colloidal Gold Immunochromatography)




- ① nicht invasiv
- ② einfach zu verwenden
- 3 praktisch, keine Geräte erforderlich
- 4 schnell, Ergebnis in 15 Minuten
- stabil, mit hoher Genauigkeit
- 6 kostengünstig, kosteneffizient






Schritt 1: Verwenden Sie Tupfer zur Probenentnahme

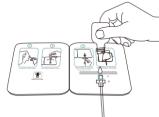

Schritt 2: Die Probe durch die Vertiefung B in die Vertiefung A geben, 6 Tropfen Puffer in Vertiefung A geben

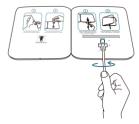

Schritt 3: Drehen Sie die Welle zuerst im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, jeweils zweimal



Schritt 4: Ziehen Sie den Klebstoff ab, falten Sie die linke Seite umdrehen und 15 Minuten warten

## **Ergebnis**





